



Programação dos Reagentes CEPA

BIOCLIN SYSTEMS

ALT-GPT Ceba

Cinético UV-U/L - 37°C (IFCC)

| | |
|---------------|----------|
| MODO? | Cinética |
| LEITURA? | Mono |
| FILTRO? | 340 |
| TEMP? | 37 °C |
| VOL ASP? | 400 |
| UNIDADE | U/L |
| LIMITE LIN? | 500 |
| INCLINAÇÃO | Decresc |
| CALCULO? | Fator |
| FATOR | 3333* |
| DELAY INICIAL | 60 |
| QUANT INTERV | 3 |
| TEMP INTERV | 60 |

* É recomendável a utilização de soros controles para verificação do fator.