



Programação dos Reagentes CEPA

QUICK LAB I

ALT-GPT Ceba

Cinético UV-U/L - 37°C (IFCC)

MODO?	Cinética
LEITURA?	Mono
FILTRO?	340
TEMP?	37 °C
VOL ASP?	400
UNIDADE	U/L
LIMITE LIN?	500
INCLINAÇÃO	Decresc
CALCULO?	Fator
FATOR	3333*
DELAY INICIAL	60
QUANT INTERV	3
TEMP INTERV	60

* É recomendável a utilização de soros controles para verificação do fator.