

Nome	ASLO TURB
Unidades	UI/mL
Modo de Cálculo	Tempo Fixo
Curva de reação	Crescente
Modo de Leitura	Mono
Filtro de Leitura	546
Filtro de referência	-
Volume de amostra	500
Temperatura	37
Decimais	0
Réplicas amostra	1
Tempo de incubação	05s
Tempo de leitura	60
Calibração	Calibrador
Número de calibradores	1
Concentração	250
Réplicas calibradores	1
Limite de Linearidade	800
Limite do branco	1500
Valor Mínimo normal	*
Valor Máximo normal	*
Controle 1	*
Controle 2	*

* Insira o valor da concentração do calibrador ** Vide Bula