



Programação dos Reagentes CEPA

A 25®

ASLO Cepa

Turbidimetria

GERAL		CALIBRAÇÃO	
Modo de Análise	P. F Mono	Replicatas do Branco	3
Tipo de Amostra	Soro		
Unidades	UI/mL	Replicatas do Calibrador	3
Tipo de Reação	Crescente	Tipos de Calibração	Específico
Teste Turbidimétrico	Sim		
Número de Replicatas	1		-
Decimais	0	Concentração	*
Constituinte Associado	-	Curva de Calibração	-
PROCEDIMENTO		CONTROLES	
Leitura	Monoc	Número de Controles	*
Principal	535	Replicatas de Controles	*
Referência		Critério de Rejeição	*
Volumes		Tipo de Controle	*
Amostra	3	Modo de Cálculo	*
Reagente 1	300	Nome	*
Reagente 2	-	TÉCNICAS PROGRAMADAS	
Lavagem	1.2	Lote	*
Tempos		Valor Máximo	*
Leitura 1	120s	Valor Mínimo	*
Leitura 2	-	OPÇÕES	
Reagente 2	-	Realizar Branco sem água	-
Fator de Pré Diluição	-	Limite de abs do branco	0.900
Tipo de Pré Diluição	-	Limite do Branco cinético	-
Fator de Pós Diluição	2	Limite de Linearidade	800 UI/mL
Reduzido	-	Limite de Detecção	-
Aumentado	-	Limite de Fator	-
Repetição automática	-	Faixa de Referência	-

*Inserido pelo usuário

- Utilizar calibradores proteicos para calibração do sistema. Utilizar soros controles comerciais para avaliação da performance do sistema.