



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

Albumina Cepa

Verde de Bromocresol - Colorimétrico

MODO	P.F	P1	*
WL1	620	UNID	g/dL
WL2	-	DECIMAIS	2
BLANK?	SIM	LIM LIN MIN	0,5
BLK-AMOS-PAD?	NÃO/ NÃO	LIM LIN MAX	6,0
CUB FLUXO?	SIM	ABS REAT MIN	0
TEMP?	25°C	ABS REAT MAX	0,350
VOL ASP	0800	ABS PAD MIN	0,100
RETARDO	003	ABS PAD MAX	0,600
PADRÃO?	SIM	VR/VN MIN	*
PAD (QUANT)	ÚNICA	VR/VN MAX	*

* Inserido pelo usuário