



Programação dos Reagentes CEPA

BIOCLIN SYSTEMS

Alfa Amilase Cepa

GAL G2 CNP – Cinético

MODO?	Cinética
LEITURA?	Mono
FILTRO?	405
TEMP?	37 °C
VOL ASP?	400
UNIDADE	U/L
LIMITE LIN?	1300
INCLINAÇÃO	Crescente
CALCULO?	Fator
FATOR	3239*
DELAY INICIAL	60
QUANT INTERV	3
TEMP INTERV	60

* É recomendável a utilização de soros controles para verificação do fator.