



## Programação dos Reagentes CEPA

### QUICK LAB I

---

#### Alfa Amilase Cepa

GAL G2 CNP – Cinético

|               |           |
|---------------|-----------|
| MODO?         | Cinética  |
| LEITURA?      | Mono      |
| FILTRO?       | 405       |
| TEMP?         | 37 °C     |
| VOL ASP?      | 400       |
| UNIDADE       | U/L       |
| LIMITE LIN?   | 1300      |
| INCLINAÇÃO    | Crescente |
| CALCULO?      | Fator     |
| FATOR         | 3239*     |
| DELAY INICIAL | 60        |
| QUANT INTERV  | 3         |
| TEMP INTERV   | 60        |

\* É recomendável a utilização de soros controles para verificação do fator.