



Programação dos Reagentes CEPA

COBAS MIRA / MIRA PLUS

Bilirrubina Direta Cepa

Sims-Horn-colorimétrico

Bilirrubina Direta

- Main Reagent: Uma parte do Sulfanílico para nove partes de água destilada.
- Start Reagent: Uma gota de nitrito de sódio para cada 1,5 mL de ácido sulfanílico

GENERAL		CALCULATION	
MEASUREMENT MODE	ABSORB	SAMPLE LIMIT	0,2
REACTION MODE	R-S - SR1	REACTION DIRECTION	INCREASE
CALIBRATION MODE	FACTOR	CHECK	OFF
REAGENT BLANK	REAG/DIL	CONVERSION FACTOR	1
CLEANER	BEFORE	OFF SET	0
WAVELENGTH	550	TEST RANGE LOW	0
DECIMAL POSITION	2 mg/dL	HIGH	15
UNIT	12 mg/dL	NORMAL RANGE LOW	NO
ANALYSIS		HIGH	NO
POST DIL FACTOR	3	NUMBER OF STEPS	1
CONC. FACTOR	NO	CALCULATION STEP A	ENDPOINT
SAMPLE CYCLE	1	READING FIRST	2
VOLUME		LAST	14
DILUTION NAME	H2O	REACTION LIMIT	-
VOLUME	6,7 µL	CALIBRATION	
REAGENT CYCLE	1	CALIBRATION INTERVAL	ON REQUEST
VOLUME	150 µL	TIME	NO
START REAGENT 1 CYCLE	3	BLANK RANGE LOW	-0,01
VOLUME	16,6	HIGH	0,36
DIL	3,4	REAGENTE RANGE LOW	-0,05
		REAGENT RANGE HIGH	0,2