



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

CK NAC (TOTAL) Cepa

IFCC- Cinético

MODO	CIN	INT CINÉTICO	060
WL1	340	Nº INTERVALOS	3
TEMP?	37°C	ΔA/MIN	0,200
VOL ASP	** 0400	% LIM LIN	10
RETARDO	180	DIR	INCR
FATOR	*** 3333	ABS REAT MIN	0
UNID	U/L	ABS REAT MAX	0,500
DECIMAIS	0	VR/VN MIN	*
IMPRESSÃO	EXTENSA	VR/VN MAX	*

* Inserido pelo usuário

**Técnica Micro (0,5 mL do Reagente de Trabalho)

*** **Fator teórico.** Este fator não leva em conta os erros de medição (Lâmpada, filtros ...), sendo assim, é necessário conferência do fator teórico utilizando soros controles, e se necessário, realizar calibração do sistema utilizando calibradores comerciais para que se possa minimizar os erros sistêmicos.