



## Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

---

### Cálcio Cresolftaleína Cepa

O-Cresolftaleína Complexona - Colorimétrico

MODO	P.F	P1	*
WL1	570	UNID	mg/dL
WL2	-	DECIMAIS	1
BLANK?	SIM	LIM LIN MIN	0,7
BLK-AMOS-PAD?	NÃO/ NÃO	LIM LIN MAX	15
CUB FLUXO?	SIM	ABS REAT MIN	0
TEMP?	25°C	ABS REAT MAX	0,300
VOL ASP	**0400	ABS PAD MIN	0,200
RETARDO	003	ABS PAD MAX	0.800
PADRÃO?	SIM	VR/VN MIN	*
PAD (QUANT)	ÚNICA	VR/VN MAX	*

\* Inserido pelo usuário

\*\*Técnica Micro (0,5 mL do Reagente de Trabalho)