



## Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

---

### Colesterol HDL Cepa

Direto

MODO	T.F	P1	*
WL1	620	UNID	mg/dL
WL2	-	DECIMAIS	1
BLANK?	NÃO	INT. CINÉTICO	180
BLK-AMOS-PAD?	NÃO/ NÃO	LIM LIN MIN	0000
CUB FLUXO?	SIM	LIM LIN MAX	200
TEMP?	37°C	ABS REAT MIN	-0,012
VOL ASP	0800	ABS REAT MAX	0,500
RETARDO	003	ABS PAD MIN	*
PADRÃO?	SIM	ABS PAD MAX	*
PAD (QUANT)	ÚNICA	VR/VN MIN	*
		VR/VN MAX	*

\* Inserido pelo usuário