

# Colesterol Total Cepa

Enzimático Monoreagente

MODO	<b>P.F</b>	P1	*
WL1	<b>500</b>	UNID	<b>mg/dL</b>
WL2	<b>-</b>	DECIMAIS	<b>1</b>
BLANK?	<b>SIM</b>	LIM LIN MIN	<b>0</b>
BLK-AMOS-PAD?	<b>NÃO/ NÃO</b>	LIM LIN MAX	<b>1000</b>
CUB FLUXO?	<b>SIM</b>	ABS REAT MIN	<b>-0,012</b>
TEMP?	<b>37°C</b>	ABS REAT MAX	<b>0,300</b>
VOL ASP	<b>0400</b>	ABS PAD MIN	<b>0,100</b>
RETARDO	<b>003</b>	ABS PAD MAX	<b>0,500</b>
PADRÃO?	<b>SIM</b>	VR/VN MIN	*
PAD (QUANT)	<b>ÚNICA</b>	VR/VN MAX	*

\* Inserido pelo usuário

\*\* Técnica micro (0,5 mL de reagente).