



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

Creatinina Cepa

Picrato alcalino (Jaffé) – Colorimétrico

MODO	T.F.	DECIMAIS	1
WL1	505	LIM LIN. MIN	0
BLANK	NÃO	LIM. LIN MAX	10
BLK-AMOS/PAD	NÃO/NÃO	INT CINÉTICO	30
CUB.FLUXO	SIM	Nº INTERVALOS	1
TEMP?	37°C	DA/MIN	0.200
VOL ASP	**0400	% LIM LIN	10
RETARDO	30	DIR	INCR
PADRÃO	SIM	ABS REAT MIN	0,100
PAD (QUANT)	UNI	ABS REAT MAX	1.800
P1	4	VR/VN MIN	*
UNID	U/L	VR/VN MAX	*
IMPRESSÃO	EXTENSA		

* Inserido pelo usuário

**Técnica Micro (0,5 mL do Reagente de Trabalho)