

Fator Reumatóide

Turbidimetria

GERAL					
FR		Cepa		Ponto Final Branco de Reagente	
C.O. Primário	630 nm	C.O. Bicromático	0 nm	Unidade	UI/mL
				Decimal	0
Dispensado					
Vol. Amostra	5 µL	R1 Volume	250 µL	R2 Volume	0 µL
				T. dispensação do reag. 2	0 seg
Índice de deterioração do reagente					
Abs. Min.	0	Abs. Máx.	0.3	Intervalo de verificação	
				16 horas	

FATOR		
☐	Método Decrescente	
☐	Fator	
☒	Calibrador	
Ponto	Concentração	Absorbância
	**	
Adicionar	Modificar	Excluir
Interpolação	Linear	Curva

VALORES DE REFERÊNCIA				
Idade mínima	Idade máxima	Sexo	Valor mínimo	Valor máximo
#	#		0	30
		Qualquer		
	Entrar		Excluir	

ESPECIAIS

Opções do tipo de método

T. branco de reagente

40 seg.

Intervalo entre os brancos

72 hs

T. incubação

150 seg.

Repetição

1.5

Limite linear

150 mg/L

AVANÇADAS

Gap ar inicial

2 µL

Diluição com:

Lavagem para evitar interferência

Velocidade Gap inicial

500

Amostra

Lavagem por auto interferência: 0

Gap Separação Reag./Amostra

2µL

Vel. Gap Sep. Reag./Amostra

500

Vol. de amostra min.

Vel. de aspiração R1 + Amostra

2500

2µL

R2 vel. dispensação

2500

R1 vel. de aspiração

2000

Vol. de aspiração da amostra

R2 vel. de aspiração

2000

500

Método	Lavagens