



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

Fator Reumatóide Cepa

Turbidimetria

MODO	P.F	P3	*
WL1	650	P4	*
WL2	-	P5	*
BLANK?	SIM	UNID	UI/mL
BLK-AMOS-PAD?	NÃO/ NÃO	DECIMAIS	2
CUB FLUXO?	SIM	LIM LIN MIN	0003
TEMP?	37°C	LIM LIN MAX	800
VOL ASP	0800	ABS REAT MIN	-
RETARDO	120	ABS REAT MAX	-
PADRÃO?	SIM	ABS PAD MIN	-
PAD (QUANT)	ÚNICA	ABS PAD MAX	-
P1	*	VR/VN MIN	*
P2	*	VR/VN MAX	*

* Inserido pelo usuário