

Glicohemoglobina Cepa

Resina de troca catiônica

MODO	P.F	P1	33,3
WL1	405	UNID	%
WL2	-	DECIMAIS	1
BLANK?	SIM	LIM LIN MIN	0000
BLK-AMOS-PAD?	NÃO/ NÃO	LIM LIN MAX	35
CUB FLUXO?	SIM	ABS REAT MIN	-0.010
TEMP?	25°C	ABS REAT MAX	1.300
VOL ASP	**0400	ABS PAD MIN	0.500
RETARDO	003	ABS PAD MAX	2.000
PADRÃO?	SIM	VR/VN MIN	*
PAD (QUANT)	ÚNICA	VR/VN MAX	*

Obs.:

- Para branco: Insira água
- Para padrão: Insira hemoglobina total
- Para amostra: Insira hemoglobina glicada

* Inserido pelo usuário

**Técnica Micro (0,5 mL do Reagente de Trabalho)