



## Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

---

### Glicose Cepa

Enzimático - Colorimétrico

MODO	P.F	P1	*
WL1	<b>520</b>	UNID	<b>mg/dL</b>
WL2	-	DECIMAIS	<b>1</b>
BLANK?	<b>SIM</b>	LIM LIN MIN	<b>0</b>
BLK-AMOS-PAD?	<b>NÃO/ NÃO</b>	LIM LIN MAX	<b>500</b>
CUB FLUXO?	<b>SIM</b>	ABS REAT MIN	<b>-0,012</b>
TEMP?	<b>37°C</b>	ABS REAT MAX	<b>0,300</b>
VOL ASP	<b>0400</b>	ABS PAD MIN	<b>0,100</b>
RETARDO	<b>003</b>	ABS PAD MAX	<b>0,500</b>
PADRÃO?	<b>SIM</b>	VR/VN MIN	<b>*</b>
PAD (QUANT)	<b>ÚNICA</b>	VR/VN MAX	<b>*</b>

\* Inserido pelo usuário

\*\*Técnica Micro (0,5 mL do Reagente Enzimático)