



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

Proteína C Reativa Cepa

Turbidimetria

MODO	T.F.	DECIMAIS	0
WL1	540	LIM LIN. MIN	0
BLANK	NÃO	LIM. LIN MAX	10
BLK-AMOS/PAD	NÃO/NÃO	INT CINÉTICO	120
CUB.FLUXO	SIM	Nº INTERVALOS	1
TEMP?	37°C	DA/MIN	0.200
VOL ASP	800	% LIM LIN	10
RETARDO	10	DIR	INCR
PADRÃO	SIM	ABS REAT MIN	-
PAD (QUANT)	UNI	ABS REAT MAX	-
P1	*	VR/VN MIN	*
UNID	mg/L	VR/VN MAX	*
IMPRESSÃO	EXTENSA		

* Inserido pelo usuário