



## Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

---

### Proteína C Reativa Cepa

Turbidimetria

MODO	T.F.	DECIMAIS	0
WL1	<b>540</b>	LIM LIN. MIN	0
BLANK	<b>NÃO</b>	LIM. LIN MAX	10
BLK-AMOS/PAD	<b>NÃO/NÃO</b>	INT CINÉTICO	120
CUB.FLUXO	<b>SIM</b>	N° INTERVALOS	1
TEMP?	<b>37°C</b>	DA/MIN	0.200
VOL ASP	<b>800</b>	% LIM LIN	10
RETARDO	<b>10</b>	DIR	INCR
PADRÃO	<b>SIM</b>	ABS REAT MIN	-
PAD ( QUANT)	<b>UNI</b>	ABS REAT MAX	-
P1	*	VR/VN MIN	*
UNID	<b>mg/L</b>	VR/VN MAX	*
IMPRESSÃO	<b>EXTENSA</b>		

\* Inserido pelo usuário